

CPAP laitteen ja varusteiden huolto-ohje

MASKIN PUHDISTAMINEN

Joka päivä tai jokaisen käyttökerran jälkeen

- Pura maski osiin (katso ohjeet maskin käyttöohjeesta). Jos käytät sierainmaskia, irrota sieraintyynyt rungosta.
- Sivupehmusteita ja pääremmejä lukuun ottamatta, pese kaikki maskin osat lämpimässä vedessä (30 °C), jossa on mietoa pesuainetta, LV tai Erisan.
- Poista kasvoista irronnut rasva maskityynystä, **paitsi jos käytät memory foam -maskityynyä. Sitä ei saa koskaan upottaa veteen, vaan se puhdistetaan säännöllisesti pyyhkimällä.**
- Puhdista varovasti pehmeällä harjalla maskin ilma-aukko tai puhdistusta vaativat mahdolliset pyörivät osat, kuten pyörivä liitin, sen rengas tai pallonivel.
- Tarkasta kaikki maskin osat huolellisesti. Jos jokin osa ei näytä puhtaalta tai on vielä rasvainen, toista edellä kuvattu pesuvaihe.
- Huuhtelee lopuksi osat huolellisesti käyttämällä juomakelpoista hanavettä, ja anna osien kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

PÄÄREMMIN PUHDISTAMINEN

- Pääremmit ja sivupehmusteet pestään käsin miedolla nestemäisellä pesuaineella **kerran viikossa.**
- Huuhdo hyvin, puristele vesi pääremmeistä ja anna kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina.

ILMALETKUN PUHDISTAMINEN

Suosittellemme, että irrotat ilmaletkun laitteesta joka päivä ja ripustat sen puhtaaseen, kuivaan paikkaan. Vältä aina suoraa auringonvaloa, joka voi haurastuttaa ilmaletkua.

Puhdista ilmaletku kerran viikossa seuraavasti:

- Irrota ilmaletku hoitolaitteesta.
- Pese se lämpimässä vedessä, jossa on mietoa pesuainetta.
- Huuhtelee hyvin ja ripusta kuivumaan puhtaaseen paikkaan suoralta auringonvalolta suojattuna.

KOSTUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pese kostuttimen vesisäiliö joka päivä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtelee hyvin ja anna kuivua suoralta auringonvalolta suojattuna.

Kerran viikossa:

- Irrota läppäkannen tiiviste ja pese se miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä.
- Pyyhi vesisäiliön ulkopinta miedolla pesuainevedellä kostutetulla liinalla.
- Kuivaa pyyhkimällä kuivalla liinalla.

Toisistaan irrotetut säiliön kansi, tiiviste ja pohjaosa voidaan pestä myös astianpesukoneessa kevytpesutai lasipesuohjelmilla (ainoastaan ylähyllyllä). Vesisäiliötä ei saa pestä yli 55 °C:n lämpötiloissa.

- Puhdista mahdolliset valkoiset jauhemaiset kertymät liuoksella, jossa on 1 osa etikkaa ja 10 osaa vettä.
- Anna liuoksen vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhto säiliö puhtaalla vedellä

ILMANSUODATTIMET

- Vaihda 3 - 6 kk välein

AIRSENSE 11 LAITTEEN LETKULIITIN

- Vapauta koneen sisällä oleva letkuliitin painamalla kiinnikettä lujasta.
- Irrota letkuliitin vetämällä se ulos laitteen takana olevasta liitännästä
- **Puhdistus kerran viikossa**
- Pese lämpimässä vedessä, jossa on mietoa pesuainetta TAI etikka/ vesi liuoksessa.
- Huuhtelee hyvin ja anna kuivua.
- Letkuliittimen voi pestä myös astianpesukoneessa